

## Art. PediTurn – Sistema per il trasferimento in sicurezza del paziente

<b>Codice Articolo</b>	IM99836GT
<b>N° Repertorio</b>	-
<b>Codice CND</b>	Y123099

### Caratteristiche

Piattaforma a disco utilizzabile per il trasferimento del paziente in modo semplice ed efficace; utile a ridurre i rischi di danni alle articolazioni degli arti inferiori (ginocchia e caviglie). L'interno in nylon garantisce l'ottimale funzionalità; i lati superiore ed inferiore sono in materiale antiscivolo. Maniglia di trasporto e posizionamento.

### Impiego

Ausilio realizzato in materiale morbido, antiscivolo, per il trasferimento del paziente da un piano d'appoggio (letto) ad un altro, esempio: letto/carrozzina, carrozzina/sedia doccia, carrozzina/wc, carrozzina/auto. Utilizzabile senza scarpe o pantofole.

### Target

Reparti di degenza, lungodegenza, case protette, RSA, domicilio.

### Controindicazioni

Dispositivo non adatto per pazienti agitati, psichiatrici, aggressivi.

### Avvertenze

La mancata osservanza delle indicazioni riportate dal fabbricante può causare un uso improprio del prodotto. Non utilizzare utensili, strumenti da taglio o altri mezzi in grado di provocare modifiche di qualunque genere.

### Stoccaggio

Proteggere dall'umidità, da fonti di calore e dall'esposizione diretta ai raggi solari.



### Caratteristiche Tecniche

Materiale impiegato	Struttura in nylon, poliestere e PVC.
Pulizia	Lavabile con acqua e saponi neutri, asciugare con panno morbido. Non utilizzare ammorbidenti e soluzioni a base di cloro (il cloro danneggia le superfici antiscivolo).
Dimensione	IM99836GT - Dimensioni piastra: diametro cm 400 mm
Pesi	Peso complessivo 0,35 Kg - Portata massima 150 Kg
Confezionamento:	Cartone con 1 pezzo

### Modo d'Uso

<p>Posare il disco a pavimento davanti ai piedi del paziente; far posare i piedi al centro del disco; al fine di ottenere la massima efficacia e sicurezza per il paziente, si consiglia l'utilizzo di una cintura di supporto; aiutare il paziente nella fase di trasferimento.</p>	
--	--

LATEX FREE

Dispositivo Medico di Classe I

Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

### COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale  
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)  
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

[www.coremec.it](http://www.coremec.it)

e-mail: [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



### COREMEC s.r.l.

Export Department  
e-mail: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti  
ST\_PediTurn Edizione \_r0\_2019