


## ❖ Scheda Tecnica MEDIPAWS ❖

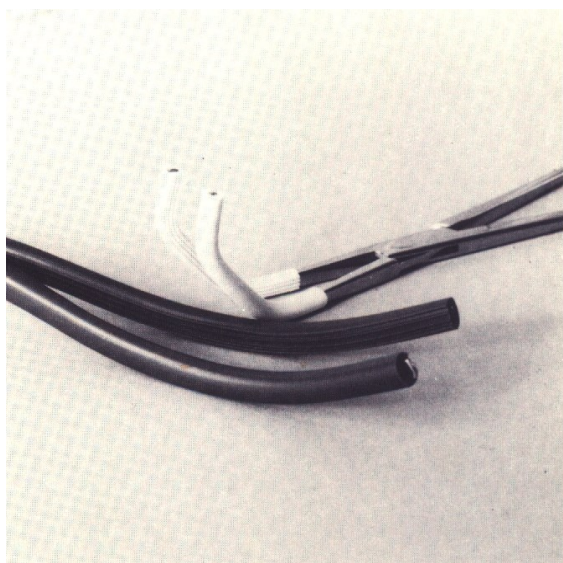

### Coprimorsi in silicone

Sono realizzati in silicone Medical Grade morbido e elastico.

Si adattano bene alle differenti angolazioni dello strumentario chirurgico trasformando i morsi standard in atraumatici.

Disponibili in 3 dimensioni differenti.


Applicazioni:

- \* Chirurgia Vascolare
- \* Chirurgia Toracica
- \* Chirurgia Pediatrica
- \* Chirurgia gastro-intestinale
- \* Urologia
- \* Neurochirurgia

Confezione sterile da 1 paio

### MODO D'USO

- 1 Aprire la confezione sterile dei MEDIPAWS e introdurre il morso dello strumento nei coprimorsi
- 2 Nel caso i coprimorsi abbiano una lunghezza eccessiva tagliare le parti eccedenti con una forbice sterile.
- 3 Al termine dell'intervento rimuovere i coprimorsi dallo strumento. Nel caso non siano danneggiati è possibile il loro reimpiego dopo la sterilizzazione

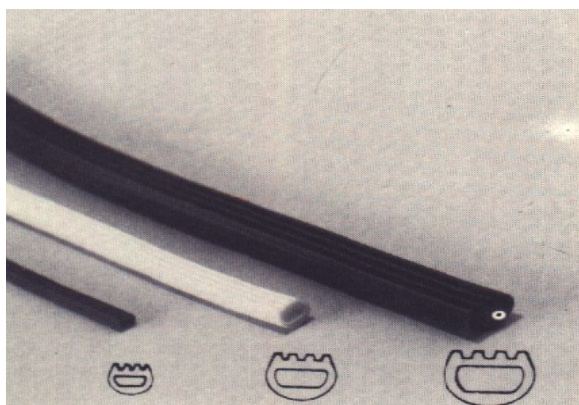

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO	DIMENSIONI		COLORE
01/2832	mm 2,6 cm 12,5	Mini	rossi
01/2835	mm 5,2 cm 12,5	Midi	bianchi
01/2837	mm 7,8 cm 12,5	Maxi	blu

STERILIZZAZIONE CON GAS ETO

**CE** 0482